

## Comoda WC camera, tip 380002 Montaj si utilizare

### Componenta:



fig.1

1. Capac
2. Colac sezut
3. Suport sprijin spate
4. Suport sprijin brate
5. Rama sezut
6. Suport stanga dreapta fixare rama sezut
7. Vas colector necesitati
8. Sistem cu bila pentru reglajul in intimitate al picioarelor comodei
9. Laterala mobila stanga
10. Laterala mobila dreapta

### Montaj comoda

Comoda WC este pliata pentru a ocupa un spatiu redus. Extrageți comoda din ambalajul original, ea va arata conform fig.2

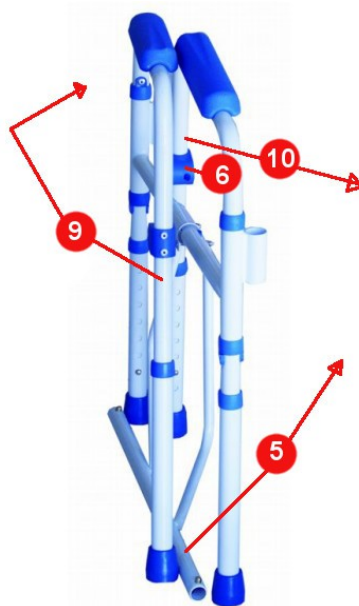


fig.2

Lateralele 9 si 10 sunt pliate, rotiti laterala 9 pana ajunge in fata suportului de sezut 5, rotiti laterala 10 pana ajunge in fata suportului de sezut 5. Ridicati la orizontala suportul de sezut 5 si introduceti-l cu fiecare capat in suportii de fixare 6, aflat cate unul pe fiecare laterala a comodei. Suportul de sezut 5 are la extremitati cate o bila care il va bloca in interiorul suportilor de fixare 6, verificati blocarea corecta in ambele laterale.

Instalati suportul de sprijin al spatelui 6, pe cele doua laterale, si acest suport are in fiecare extremitate cate o bila de blocare.

Ajustati lungimea fiecarui picior la lungimea dorita, acest lucru se realizeaza apasand bila de blocare si stabilind lungimea dorita. Pe fiecare picior sunt 7 gauri de reglaj a lungimii acestuia. Aveti grija ca fiecare picior sa aiba aceeaasi lungime.

Montati pe suportul de sezut 5, pe bara din spate a acestuia capacul 1 si colacul 2, acestea au un sistem de clips cu care se fixeaza. Fixati vasul de colectare pe suportul de sezut.

### **Masuri de siguranta**

- verificati ca cele 4 picioare sa fie reglate la aceeaasi lungime, verificati fiecare bila de blocaj fixeaza in mod sigur picior la lungimea reglata
- acest scaun este conceput sa fie utilizat in interiorul casei
- comoda WC trebuie sa fie asezata pe o suprafata plana si stabila
- nu poate fi utilizat in cabina de dus
- nu depasiti greutatea maxima de 110 kg indicata de fabricant.

### **Utilizare**

In vasul de colectare puneti un sac menajer cu marginile rasfrante peste partea superioara a vasului, in interiorul sacului menajer plasati un strat de hartie igienica cu rol de absorbat, dupa colectarea necesitatilor inlaturati sacul menajer si inlocuiti-l cu unul nou.

### **Intretinere si curatare**

Comoda WC nu necesita o intretinere deosebita, verificati periodic daca partile componente sunt bine fixate cu bilele de blocaj mentionate mai sus.

Curatarea cadrului se poate face cu o carpa de moale umeda si solutie de sapun. Capacul, colacul si vasul de colectare se detasaza si se pot spala separat eventual in jet de apa.