


Scaun pentru dus si cada cu spatar cod RX396

Indicatii pentru montaj

A – șezut, B,C set picioare sprijin, D suportți susținere spătar, E spătar

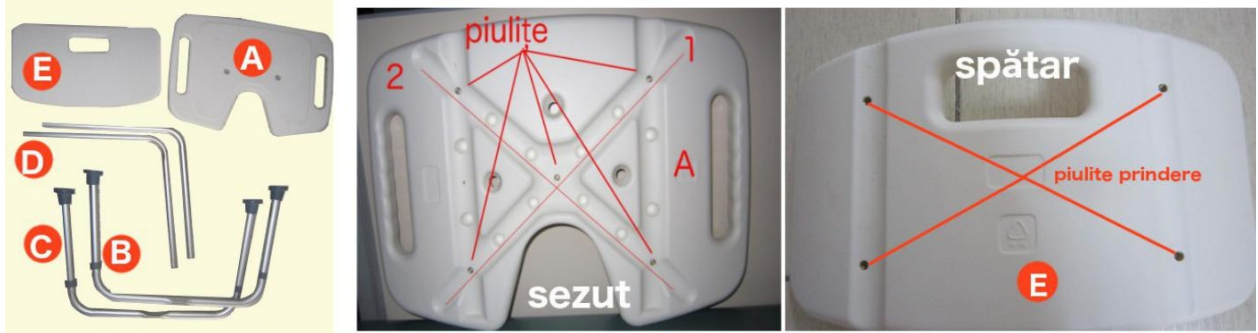


1 și 2 sunt marcate cele doua canale în care se vor plasa seturile de picioare. Pe spatele șezutului există 5 piulițe în care se vor înșuruba șuruburile de fixare a seturilor de picioare, pe spătar sunt 4 piulițe

2. Montarea seturilor de picioarelor

Setul B, în zona șurubului central este aplatizat pe ambele părți, sus – jos, este setul care se va plasa primul în unul din canalele de montaj marcate 1 sau 2

Setul C este aplatizat doar sus adică partea care se va suprapune peste setul B în zona șurubului central

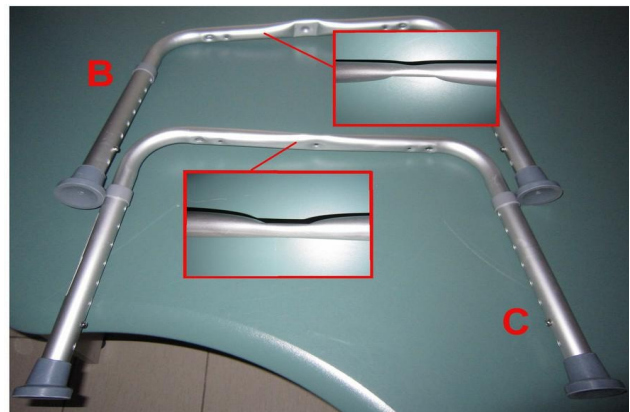

Urmăriți modul de așezare al picioarelor și cum se pun șuruburile și șaibe în vederea fixării picioarelor de șezut. Se pune setul de picioare B, peste el se așază setul C. Șuruburile din cele patru colțuri au șaibe profilate care trebuie așezate conform detaliului de montaj din figură. În final fixați spătarul prin cele 4 șuruburi ramase



După ce ați verificat strângerile întoarceți scaunul în poziție normală și îl puteți folosi. Înălțimea scaunului se reglează ajustând înălțimea fiecărui picior, cu ajutorul butoanelor și a găurilor de reglaj. Înainte de utilizare verificați cu atenție ca fiecare picior să aibă aceeași lungime.

