

Informatii montaj Scaun pentru dus RX395

1. Despachetați scaunul pentru cabina de duș. Aveți 3 componente conform fig.1. A – este șezutul scaunului, imaginea este a feței inferioare, acolo unde se vor monta cele 2 seturi de picioare.

1 și 2 sunt marcate cele doua canale în care se vor plasa seturile de picioare. Pe spatele șezutului există 5 piulițe în care se vor înșuruba șuruburile de fixare a seturilor de picioare

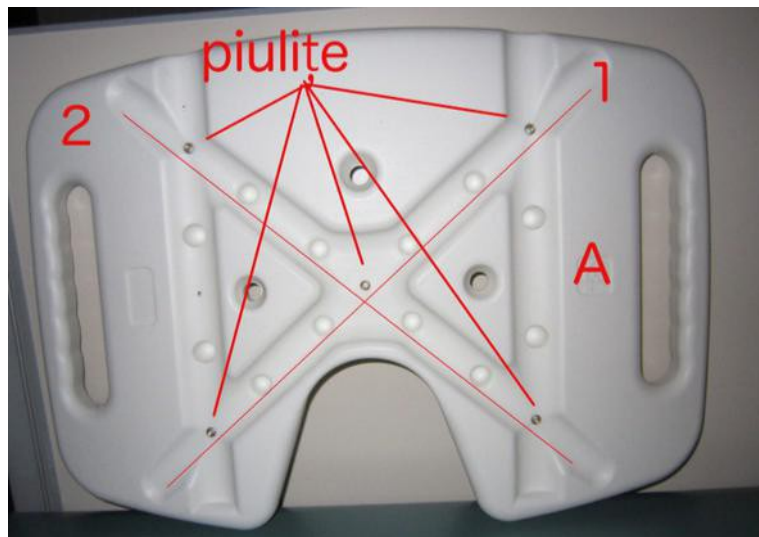


fig.1

2. Montarea seturilor de picioarelor

Setul B, în zona șurubului central este aplatizat pe ambele părți, sus – jos, este setul care se va plasa primul în unul din canalele de montaj marcate 1 sau 2

Setul C este aplatizat doar sus adică partea care se va suprapune peste setul B în zona șurubului central

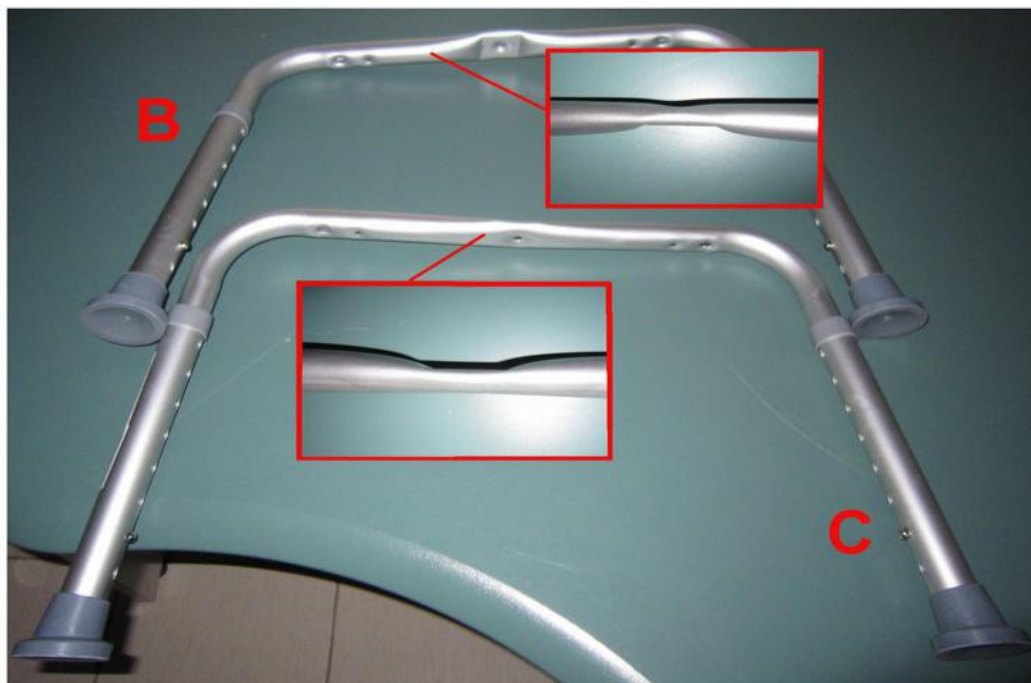


fig.2

În fig.3 urmăriți modul de așezare al picioarelor și cum se pun șuruburile și șaibele în vederea fixării picioarelor de șezut. Se pune setul de picioare B, peste el se așază setul C. Șuruburile din cele patru colțuri au șaibe profilate care trebuie așezate conform detaliului de montaj din fig.3. Șurubul central nu are șaiba.

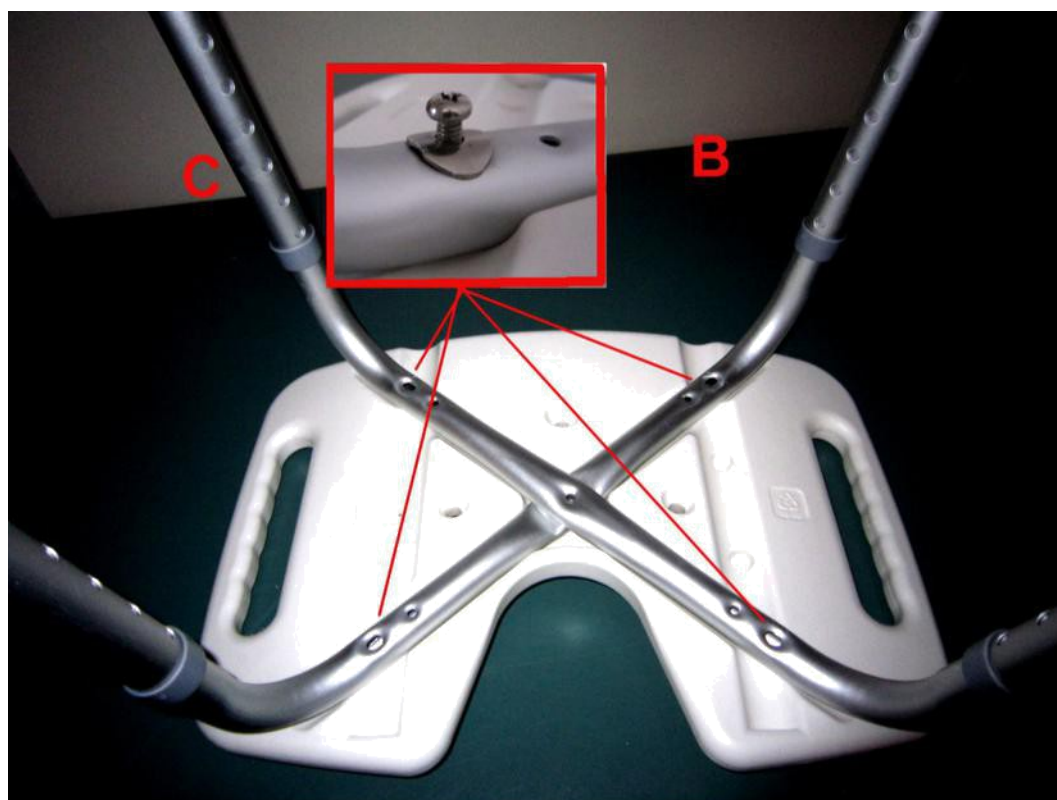


Fig.3



fig.4

Strângeți cele 5 șuruburi folosind o șurubelniță cap cruce. După ce ați verificat strângerile întoarceți scaunul în poziție normală și îl puteți folosi. Înălțimea scaunului se reglează ajustând înălțimea fiecărui picior, cu ajutorul butoanelor și a găurilor de reglaj. Înainte de utilizare verificați cu atenție ca fiecare picior să aibă aceeași lungime.