


Comoda WC de camera, cu roti pentru deplasare, tip RX296 Montare, reglaj, intretinere

Comoda wc de camera are un schelet de otel pliabil. In cutia de ambalaj, pentru ca spatiul ocupat sa fie minim, comoda este pliata. Dupa ce se scot din ambalaj toate componentele comodei se procedeaza astfel:

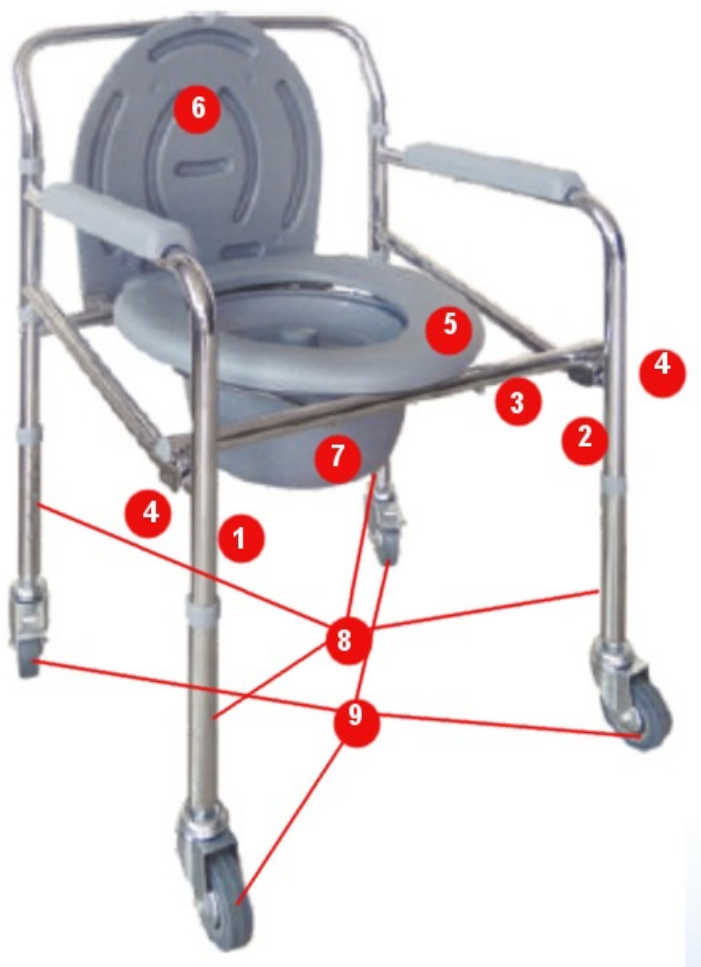

Aduceti catre partea din fata lateralele "1" si "2" si ridicati partea de sezut "3" astfel incat cele doua urechi de fixare "4" sa vina peste cele doua laterale

Montati colacul comodei. Acesta are doua cleme din PVC pentru fixarea pe sezutul se conecteaza prin presare pe bara din spate a sezutului

Montati capacul "6" al comodei WC. Acesta are doua cleme din PVC pentru fixare pe sprijinul de sezutul si intra prin presare pe bara din spate.

Recipientul pentru necesitati se introduce sub colac prin culisare pe cele doua barete de sustinere.

Inaltimea comodei poate fi modificata prin intermediul butoanelor de reglaj cate unul pe fiecare picior al acesteia "8". Se apasa butonul de reglaj si se trage in afara partea de picior cu roata pentru deplasare. Se efectueaza aceeasi operatie pentru fiecare picior avand grija ca lungimea sa fie aceeaasi, lucru ce se realizeaza pund acelasi numar de gauri de reglaj pentru fiecare picior.

Comoda se inalta suficient astfel incat poate avea si rolul de inaltator vas WC, utila celor care au suferit operatii de sold.

Rotile pentru deplasare "9" aflate pe fiecare picior, cele din partea de spate au o clapeta de blocare a acestor roti.

In recipientul pentru necesitati se pune un sac menajer din pvc, marginile acestuia se trec peste marginile recipientului. In interiorul sacului se poate aseza un strat de hartie igienica pentru a impiedica raspandirea stropilor de urina. Dupa utilizare sacul se strange si se inlocuieste cu unul nou.

Comoda se poate igieniza periodic, se scot recipientul pentru necesitati, colacul si capacul, se pot spala cu un detergent lichid sau solutie de sapun, se clatesc in jet de apa curenta, se sterg si se monteaza pe scheletul comodei.

In general comoda WC se amplaseaza in apropierea patului persoanei cu dizabilitati de deplasare pentru a facilita transferul acestuia pe comode si ulterior inapoi in pat, sau fotoliu.