

Medisorb G - metoda de aplicare



Pentru tratarea tesutului necrotic uscat, se pregateste Medisorb G si pansamentul secundar Medisorb F. Se alege marimea pansamentului secundar astfel incat sa acopere intreaga suprafata a ranii.



1. Inaintea aplicarii pansamentului, se pun manusile si se spala rana cu solutie salina 0.9%. Pielea din jurul ranii sa fie uscata.
2. Se scoate tubul din ambalaj, se indeparteaza capacul si se sterge varful cu un tampon.
3. Se aplica gelul pe suprafata ranii, fara a o atinge cu varful tubului.



4. Stratul de gel de pe rana, ar trebui sa aiba o grosime de minim 5 mm.
5. Apoi se aplica pansamentul Medisorb F, care este transparent si permite examinarea ranii.



Cand se utilizeaza Medisorb F:

6. Se indeparteaza hartia(alba) de protectie din partea centrala inferioara a pansamentului, se tine de marginile din hartie si se aplica pe piele.
7. Se indeparteaza hartia(alba) de protectie de pe margini si se lipeste si restul pansamentului. Se apasa usor pe marginile pansamentului.



8. Se indeparteaza folia de protectie din plastic, in directia indicata de sageti.



OBSERVATII:

9. Pansamentul Medisorb G se foloseste o singura data, gelul nefolosit ar trebui aruncat.
10. In cazul ranilor necrotice Medisorb G ar trebui schimbat la fiecare 24 de ore. In cazul ranilor fara tesut necrotic, gelul poate fi tinut maxim trei zile. Pansamentul trebuie schimbat urgent, daca se observa scurgeri ale gelului in afara pansamentului secundar.
11. Pentru indepartarea gelului se spala rana cu solutie salina 0.9%.

