

Medisorb H - metoda de aplicare



Se alege marimea pansamentului, astfel incat sa acopere intreaga suprafata a ranii, lasand un spatiu liber, in jurul ranii, de 2-3 cm.



1. Inaintea aplicarii pansamentului, se pun manusi si se spala rana cu solutie salina 0.9% sau solutie Ringer's. Pielea din jurul ranii sa fie uscata.
2. Se alege marimea potrivita a pansamentului, astfel incat sa acopere intreaga suprafata a ranii, lasand un spatiu liber, in jurul ranii, de 2-3 cm. Pe rani cu suprafata mare, pot fi aplicate mai multe pansamente suprapuse.



3. Se incalzeste pansamentul, prin presare intre palme, inaintea indepartarii hartiei de protectie.



4. Se indeparteaza hartia de protectie mai lata. Se pune Mdisorb H direct pe suprafata ranii si se apasa usor pe marginile pansamentului.



5. Se indeparteaza hartia de protectie mai mica si se preseaza marginile pansamentului pe piele.



OBSERVATII:

6. Ulcerul varicos(pe picior) poate fi tratat folosind pansament Mdisorb H in combinatie cu terapia prin compresie, la recomandarea medicului.
7. Sub pansament poate aparea un gel galbui cu un miros caracteristic. Acest lucru nu este o infectie, ci un fenomen normal asociat cu utilizarea pansamentelor hidrocoloidale.
8. Pansamentul ar trebui schimbat, cand suprafata se transforma in gel hidrocoloidal. Frecventa schimbarii pansamentului, depinde de cantitatea de exudat. In cazul ranilor cu foarte mult exudat, pansamentul trebuie schimbat zilnic. In cazul ranilor cu exudat moderat sau epiteliale, pansamentul poate fi tinut pana la 7 zile.